

Protocole d'entretien pour votre système d'aspiration avec Orotol[®] plus & MD 555 cleaner



Orotol plus : Dispositif médical de classe IIA CE0297

MD 555 cleaner : Dispositif médical de classe I

Dispositifs Médicaux réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Fabricant : Orochemie GmbH+Co. KG

Orotol[®] plus - Désinfection quotidienne

Avec le concentré liquide Orotol[®] plus, vous disposez de la solution idéale pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien simultanés de tous vos systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame de tous les types. A appliquer après le dernier patient à la fin de la journée, ou 2 fois par jour (midi et soir) en cas d'activité soutenue.



1 Avant de procéder au nettoyage




Aspirez 2 litres d'eau

2 Préparer 2 litres de solution Orotol plus à 2 % (2 bouchons)



Remplissez l'Orocup d'eau froide jusqu'au repère de 2 litres. Ajoutez 2 bouchons doseurs Orotol[®] plus (en respectant le repère).

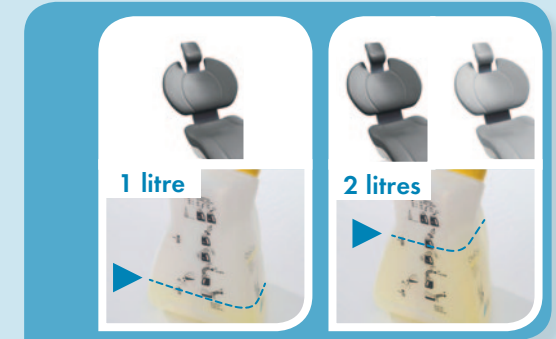

Par unité de soins :
1 litre d'eau + 1 bouchon d'Orotol[®] plus (20 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d'eau + 2 bouchons d'Orotol[®] plus (40 ml)

3 Aspiration



Aspirez 1 litre de solution par unité de soins en utilisant l'Orocup (système d'entretien muni d'adaptateurs de tuyaux pour aspirer un mélange air/solution)

4 Désinfectez le crachoir



Au moins 250 ml de solution par crachoir

5 Temps d'action



Laissez agir pendant la nuit (minimum 1 heure). Spectre d'activité : bactéricide, tuberculocide, fongicide, partiellement virucide (VIH, VHB, VHC, norovirus)

6 Rinçage de l'unité de soins



Le matin suivant, avant la remise en service, aspirez 2 litres d'eau froide.



LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

MD 555 cleaner - Nettoyant spécial


MD 555 cleaner est le nettoyant spécifique pour vos systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame de tous les types. Très puissant, il agit contre les dépôts durs à base de tartre et de poudres abrasives, les incrustations et les obstructions. Appliquez 1 fois par semaine à la pause déjeuner (voire 2 fois en cas d'activité soutenue, par exemple aéropolissage).



Aspirez 2 litres d'eau



Remplissez l'Orocup d'eau froide jusqu'au repère de 2 litres. Ajoutez 5 bouchons doseurs de MD 555 (en respectant le repère)

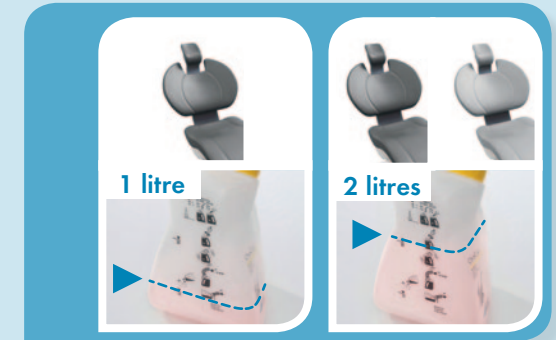

Par unité de soins :
1 litre d'eau + 2,5 bouchons de MD 555 cleaner (50 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d'eau + 5 bouchons de MD 555 cleaner (100 ml)



Aspirez 1 litre de solution par unité de soins en utilisant l'Orocup (système d'entretien muni d'adaptateurs de tuyaux pour aspirer un mélange air/solution).



Au moins 250 ml de solution par crachoir



Laissez agir pendant la pause du déjeuner (30 mn minimum à 2 heures maximum).



Après la pause, aspirez 2 litres d'eau

BEST FRIENDS



SUCTION & OROTOL PLUS

DÜRR DENTAL FRANCE
8 rue Paul Héroult
92500 Rueil-Malmaison
France
www.durrdental.com
info@durr.fr

 **DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME